

INADINE PENSO ESTÉRIL IODOPOVIDONA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O penso não-aderente Inadine consiste num tecido de malha em viscose de baixa aderência, impregnado com uma base de polietilenoglicol (PEG) contendo 10% de iodopovidona, equivalente a 1% de iodo disponível.
- O iodo é um antimicrobiano tópico altamente eficaz que é usado clinicamente no tratamento de feridas durante mais de 170 anos. Tem uma actividade antimicrobiana de largo espectro com eficaz contra bactérias, microbacterias, fungos, protozoários e vírus.
- Indicado tanto para proteção da ferida, mesmo infetada, como para o tratamento de feridas e pode igualmente ser utilizado na prevenção da infeção em queimaduras ligeiras e feridas traumáticas superficiais.
- Indicado em feridas infetadas mas também pode ser aplicado, como preventivo de infeção em queimaduras ligeiras e lesões traumáticas ligeiras com perda de pele.
- A iodopovidona tem um largo espectro de acção antimicrobiano e tem provado ser eficiente contra MRSA.
- A frequência da mudança do penso depende fundamentalmente da condição da ferida.
- Se a produção de exsudado é elevada, é provavelmente necessária uma mudança diária; mas se a ferida for relativamente seca, o intervalo entre mudanças pode ser prolongado.
- A descoloração do penso indica perda da eficácia do antisséptico, nessa altura deve-se mudar o penso.

- Estudos clínicos sugerem que o Inadine pode ser tratamento de escolha na gestão de feridas crónicas incluindo: úlceras de diferentes etiologas, úlceras do pé diabético; úlceras de pressão.

Código	Descrição	Unidade de venda
01003026	PENSO ESTÉRIL IODOPOVIDONA INADINE 9,5X9,5CM	CX. 25
01108002	PENSO ESTÉRIL IODOPOVIDONA INADINE 5X5CM	CX. 25