

VARIHESIVE HIDROGEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Bisnaga de hidrogel com aplicador.
- Estéril, composto por hidrocolóides naturais: pectina, carboximetilcelulose sódica apresentado em um veículo viscoso transparente.
- Está indicado em úlceras vasculares e úlceras por pressão de espessura parcial ao total.
- O gel cria um meio húmido ideal para a cicatrização que favorece os processos autolíticos naturais do desbridamento.
- Comporta-se de acordo com o nível de hidratação da ferida promovendo o seu hidroequilíbrio.
- Modo de utilização: limpar a lesão com água destilada, com soro fisiológico, ou com água e sabão. Evitar o uso de soluções anti-sépticas-se já que atrasam crescimento do tecido de granulação. Secar cuidadosamente a pele de ao redor da lesão. Desenrosque a tampa do tubo, retire o anel de segurança e inverta a tampa para perfurar ele tubo. Aplicar o gel diretamente dentro da lesão sem sobrepor ao nível da pele que o circunda. Utilizar um penso secundário para cobrir a lesão. Deverá trocar o penso quando existir uma fuga de gel do penso secundário, ou de acordo com a rotina do tratamento. Retirar os restos de gel com soro fisiológico. Em qualquer caso no máximo deve-se mudar de penso cada 3 dias, quando utilizado sobre lesões necróticas e esfacelos, se são lesões limpas ou em processo de granulação recomenda-se a cada 7 dias.
- Contra-indicado em pacientes com sensibilidade conhecida ao penso e suas componentes.

- Não contém látex.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|----------------------------|------------------|
| 01101015 | VARIHESIVE HIDROGEL 15 GRS | CX. 10 |
| 01101000 | VARIHESIVE HIDROGEL 15 GRS | CX. 5 |