

# VARIHESIVE PASTA HIDROACTIVA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Pasta estéril para preenchimento de feridas ligeira a moderadamente exsudativas. Contém hidrocolóide natural de gordura, de base hipoalergénica.
- Contra indicado a pacientes com sensibilidade conhecida ao produto ou aos seus componentes.
- Indicado para o tratamento de úlceras e lesões com exsudação abundante. A sua finalidade é a de absorver o excesso de exsudado a partir de lesões, aumentando o tempo de residência do penso utilizado e reduzindo a frequência da mudança. Outra finalidade é preencher irregularidades ou recessos do leito da ferida e, assim, facilitar a execução de outro curativo, placa ou gel. Indicado para feridas onde um penso convencional não faz uma cobertura efectiva do leito da ferida e para feridas com zonas de acesso difícil.
- O conteúdo do tubo é estéril até à sua abertura, por isso deve ser usado para uma aplicação.
- Instruções de uso: Limpe a área da lesão, enxaguar bem e secar a pele ao redor. Espalhe a pasta sobre as cavidades do leito da ferida com uma espátula estéril. A pasta não deve exceder o bordo da lesão. Efectuar uma lavagem simples com solução salina suficiente para remover o gel de lesão quando necessitar de substituir o penso.
- Não contém latex.

Código

Descrição

Unidade de venda

01101016

VARIHESIVE PASTA 30 GRS

CX. 1

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares