

VARIHESIVE GEL CONTROL PENSO

HIDROCOLOIDE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Pensó estéril, de espessura reduzida, que consiste de uma camada interna de hidrocolóide, que fica em contacto com a lesão, contido dentro de uma matriz polimérica adesiva e uma camada exterior de espuma de poliuretano.
- O pensó proporciona um ambiente húmido para a ferida que promove a cicatrização, facilitando o desbridamento autolítico, facilitando a migração de células epiteliais e permitindo a remoção do pensó atraumaticamente sem danificar o tecido recém formado. A camada adesiva contém polímero elastomérico que aumenta a capacidade do pensó para lidar com o exsudado da ferida através da formação de um gel coesivo.
- Caracteriza-se pela sua elevada capacidade de absorção de exsudado em lesões de pele. É indicado no tratamento de úlceras vasculares e úlceras de pressão especialmente aqueles inscitos com exsudado abundante.
- Limpe a área da lesão, enxague bem e seque a pele ao redor. Aplique o pensó de forma a que exceda 3 cm em relação ao bordo da ferida. À medida que o exsudado da ferida absorvido pelo pensó, a formação de gel pode ser visível como uma bolha na superfície do pensó. Para remover o curativo prima a pele com uma mão e cuidadosamente descasca uma borda do pensó, com a outra. O pensó pode permanecer aplicado à lesão por até 7 dias.

- Seu uso é contra-indicado em pacientes com sensibilidade conhecida ao produto ou de seus componentes.
- Disponível em diversos tamanhos com e sem rebordo.

Código	Descrição	Unidade de venda
01101003	PENSO VARIHESIVE GEL CONTROL COM RECORDO 20X20 CM	CX. 5
01101007	PENSO VARIHESIVE GEL CONTROL SEM REBORDO 10X10 CM	CX. 10
01101008	PENSO VARIHESIVE GEL CONTROL SEM REBORDO 15X15 CM	CX. 10