

CUTIMED SORBACT PENSO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A superfície do penso Cutimed Sorbact está impregnada com DACC (cloreto de dialquil carbamoil), um derivado altamente hidrofóbico dos ácidos gordos. Em ambientes húmidos, as bactérias e os fungos presentes na ferida são atraídos pela superfície do Cutimed Sorbact seguindo a lei natural da interação hidrofóbica. São captados de forma irreversível pelas fibras impregnadas com DACC, e não conseguem regressar ao leito da ferida. Os agentes patogénicos captados pelo penso são eliminados em cada mudança de penso, o que ajuda a limpar feridas contaminadas, colonizadas e infetadas através da redução da carga bacteriana total.
- Atração física. O método Sorbact: As bactérias e os fungos são, por natureza, hidrofóbicos (repelentes à água). O método Sorbact aproveita esta característica.

As vantagens de não usar um agente químico ativo; o poder de Cutimed Sorbact para combater fisicamente a infeção oferece as seguintes vantagens:

- Sem resistência bacteriana ou fúngica
- Sem atraso na cicatrização devido à morte bacteriana, resíduos celulares ou libertação de endotoxinas no leito da ferida
- Sem citotoxicidade
- Sem contraindicações: pode ser usado em todos os doentes e sem tempo limitado de utilização
- Sem riscos conhecidos de alergias

- Sempre que os micróbios prejudiquem o processo de cicatrização, o Cutimed Sorbact está preparado para combater e prevenir a infeção de feridas contaminadas, colonizadas e infetadas. O Cutimed Sorbact está disponível num ampla gama de formas e tamanhos para escolher o penso mais indicado para cada tipo de ferida, conforme a sua profundidade e o nível de exsudado.
- Cutimed Sorbact Compressa absorvente: No tratamento de úlceras e feridas com níveis de exsudado de baixos a moderados. Podem ser utilizadas para cobrir a ferida sob compressão.
- Cutimed Sorbact Ligadura de gaze: Especialmente indicadas para fístulas, também podem ser utilizadas entre os dedos do pé para a prevenção e o tratamento de infeções dérmicas fúngicas.
- Cutimed Sorbact Gaze: Ideal como película de contacto primário com a ferida, também podem ser utilizadas em feridas cavitárias.
- Cutimed Sorbact Tampões redondos: Para feridas cavitárias, também pode ser utilizado profilaticamente para reduzir a carga bacteriana.
- Cutimed Sorbact gel: Um penso que combina a gaze Cutimed Sorbact com hidrogel, para apoiar o método Sorbact em feridas secas ou pouco exsudativas, estimulando assim o desbridamento autolítico e combatendo a infeção. Para evitar que o hidrogel seque, cobrir com um penso de espuma com película de contacto de silicone, como o Cutimed Siltec.

Código	Descrição	Unidade de venda
72168-00	CUTIMED SORBACT TAMPÕES REDONDOS ± 3 CM Ø	(5 un x 14 SAQUETAS) (70 un)
72167-00	CUTIMED SORBACT LIGADURA DE GAZE 5X200 CM	CX. 10
1254029	CUTIMED SORBACT GAZE 7X8,9 CM	CX. 5
72164-00	CUTIMED SORBACT GAZE 4X6,1 CM	CX. 40
1254030	CUTIMED SORBACT GAZE 4X6,1 CM	CX. 5
72163-00	CUTIMED SORBACT COMPRESSA ABSORVENTE 10X20 CM	CX. 20
72162-00	CUTIMED SORBACT COMPRESSA ABSORVENTE 10X10 CM	CX. 40
1254018	CUTIMED SORBACT COMPRESSA ABSORVENTE 10X10 CM	CX. 5
1254038	CUTIMED SORBACT COMPRESSA ABSORVENTE 7X8,9 CM	CX. 40
1254017	CUTIMED SORBACT COMPRESSA ABSORVENTE 7X8,9 CM	CX. 5

72166-00	CUTIMED SORBACT LIGADURA DE GAZE 2X50 CM	CX.20
----------	--	-------

72165-00	CUTIMED SORBACT GAZE 7X8,9 CM	CX. 40
----------	-------------------------------	--------
