

# ASKINA TOUCH PENSO HIDROCELULAR



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma de poliuretano estéril, não-adesivo.
- Estrutura de múltiplas camadas e com elevada capacidade de absorção folha de hidrogel, assegura o máximo de absorção e retenção do exsudado, enquanto a camada exterior de poliuretano impede a penetração de líquidos e de outros contaminantes, permitindo a troca gasosa.
- Requer uma fixação secundária para fixação.
- Askina Touch é indicado para o tratamento de uma série de lesões de profundidade variável, tal como úlceras de decúbito, úlceras arteriais e venosas, úlceras ou do pé diabético.
- Askina Touch é fácil de aplicar sem requer de equipamento especial.
- Askina Touch pode ser deixado no local por vários dias, dependendo da quantidade de exsudado.
- Limpar a ferida com uma solução para limpeza e descontaminação e secar a pele em torno da lesão.
- Seleccionar o tamanho apropriado de Askina Touch cobrindo completamente a superfície da lesão, assegurar uma margem de 2 a 3 cm em torno dos bordos da lesão.
- Se necessário, Askina Touch pode ser cortado à medida antes de retirar as camadas de proteção. Sempre que necessário, é possível sobrepor vários pensos para cobrir lesões de grandes dimensões.
- Remover acabamentos. Colocar Askina toque no prejuízo e aperte suavemente para assegurar a aplicação correcta.

- Askina Touch pode ser deixado no lugar durante vários dias a uma semana, dependendo do estado da lesão.

Código	Descrição	Unidade de venda
7261002	ASKINA TOUCH 10X10CM	CX. 10
7261501	ASKINA TOUCH 10X15CM	CX. 5
7262253	ASKINA TOUCH 15X15CM	CX. 10
7264001	ASKINA TOUCH 20X20CM	CX. 5