

TESTE PARA DETECÇÃO DE DROGAS

DRUGWIPE5 MÉTODO SALIVA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Armazenagem & Eliminação

Mantenha sempre o DrugWipe® 5 em ambientes entre +5°C e +25 °C. Nunca exponha o dispositivo a temperaturas inferiores a 0°C (não o deixe congelar) ou superiores a +40°C. Após utilização ou em caso de inutilização, os dispositivos devem ser reciclados. Verifi que os procedimentos de reciclagem da sua área de residência.

- Transporte & Uso

O tempo de transporte não deve ultrapassar os 3 dias. Mantenha o teste DrugWupe®5+ em temperaturas entre +5°C até +35°C. Quando utilizado em dias de chuva ou neve, ter atenção para que o dispositivo não adquira qualquer tipo de humidade. A análise do teste deve ser feita em temperaturas entre +5°C e +40°C. Se o teste for utilizado em temperaturas inferiores a +5°C, este deverá ser previamente aquecido (por exemplo: com as mãos) antes da sua abertura.

- Controlo de Qualidade

DrugWipe®5+ tem um sistema de controlo integrado que constata a funcionalidade do teste e a sua correcta utilização.

Informe-se na sua empresa sobre as normas de utilização suplementares e o devido controlo de qualidade.

- Reações cruzadas

As substâncias presentes no teste DrugWipe® 5+ que podem causar uma reacção cruzada foram analisadas nos nossos laboratórios. Se solicitado, poderemos enviar aos nossos clientes a lista completa das substâncias testadas.

- Os diferentes produtos

DrugWipe® Testes únicos

Nº. do artigo Tipo do teste

001-CAN DrugWipe® Cannabis Sativa (haxixe, marijuana)

002-COC DrugWipe® Cocaína

003-OPI DrugWipe® Opiáceos

004-AMP DrugWipe® Anfetaminas (Ecstasy/ Metanfetaminas)

005-BEN DrugWipe® Benzodiazepinas

006-MTD DrugWipe® Metadona

- DrugWipe® TWIN

Nº. do artigo Tipo do teste

0014-TWIN-C/A DrugWipe® TWIN Cannabis/ Anfetaminas

0023-TWIN-C/O DrugWipe® TWIN Cocaína/Opiáceos

0014N-TWIN-C/A DrugWipe® TWIN teste da saliva Cannabis/Anfetaminas

0023N-TWIN-C/O DrugWipe® TWIN teste da saliva Cocaína/Opiáceos

- DrugWipe® 5

Nº. do artigo Tipo do teste

008-DW-5 DrugWipe® 5

Cannabis, Anfetaminas (Ecstasy/Metanfetaminas),Cocaína, Opiáceos

009N-DW-5+ DrugWipe® 5+ teste da saliva

Cannabis, Anfetaminas (Ecstasy/ Metanfetaminas), Cocaína, Opiáceos

Código	Descrição	Unidade de venda
20115000	TESTE P/DETECÇÃO DE DROGAS DRUGWIPE® 5+ MÉTODO SALIVA	CX.25